



盟洲醫材科技有限公司
MJ-P33 寵物製氧機應用說明

寵物製氧機

MIT

盟洲，從每一次自由呼吸開始



盟洲為毛孩子
量身訂做的製氧機

6 MJ-P33 寵物製氧機 大安心保證



01 用心之選

我們採用進口優質零件和專業分子篩技術，讓您的寶貝時刻享受最優質的氧氣供應。



02 氧氣保證

提供氧氣濃度為 $93\% \pm 3\%$ ，氧氣濃度、流量穩定且固定，確保持續提供高品質的有效氧氣，讓毛孩子也可以擁有醫療級別的製氧機。



03 靜音設計

小於45dB(A)的低噪音設計有效提升了治療的舒適性，確保毛孩子在治療過程中能夠獲得最佳的療效，同時不受環境干擾。



04 體積輕盈

輕巧的外形呈現，僅重不到10公斤，方便飼主輕鬆移動。即便需要攜帶前往外出，例如車上旅行，其量化的設計也使移動輕鬆許多。



05 安全保護

配備全面警報系統，隨時監測機器運行狀態。無論是氧氣供應不足還是其他異常情況，您都能夠第一時間得到通知，確保毛孩子的安全。



06 方便操作

LED顯示螢幕簡單直視，讓您隨時了解機器運作情況、輕鬆設定。



如何幫毛孩子 挑選製氧機？



選擇最適合的製氧機，為您的毛孩子提供適當的氧氣治療。

氧氣濃度

製氧機提供高濃度氧氣，有助於毛孩子緩解健康狀況，確保機器氧氣濃度維持在所需範圍內。

霧化功能

部分毛孩子可能需要氧氣治療同時進行霧化吸入，考慮選購帶有霧化功能的機型。

出氧流量

根據寵物需求，選擇適當的氧氣流量，以確保毛孩子的氧氣需求得到滿足。

安全性

確保製氧機設計達到毛孩子使用安全標準，防止任何潛在風險。

噪音

選擇低噪音機型，確保毛孩子使用時不會感到不適。

操作簡單

選擇簡單易用的設計，方便飼主操作和移動。



| | |
|--------------|----------------------------------|
| 產品型號 | MJ-P33 |
| 額定功率 | 260VA |
| 供氧流量 | 1-3LMP |
| 氧氣濃度 | 93%±3% |
| 出氧壓力 | 40kPa-60Pa |
| 電源 | 110V ~ / 60Hz |
| 噪音 | ≤45dB(A) |
| 外型尺寸 | 362mm x 248mm x 406mm |
| OCSI 氧濃度探測指示 | 低於82%±3%時，顯示黃色指示燈；低於72%時，顯示紅色指示燈 |
| 淨重 | 9.3kg |
| 霧化器顆粒大小 | ≤5 μm |

MJ-P33 寵物製氧機與寵物氧艙

MUMT

氧氣連接管連接之方式

①

先將寵物氧艙氧氣接口前端


(凸出來的頭朝外)放進氧艙側邊洞口中



②

再將寵物氧艙氧氣接口後端

從寵物氧艙裡面與上述接口前端旋轉接上

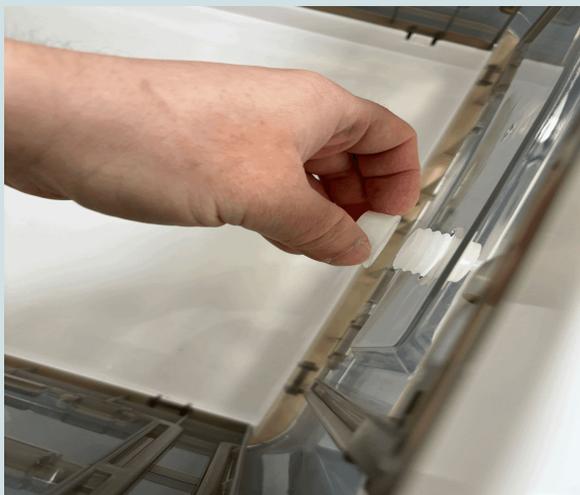

(完成圖)



MJ-P33 寵物製氧機與寵物氧艙

MJMT

氧氣連接管連接之方式

③

將氧氣連接管一端接在
寵物製氧機出氧口上




④

再將氧氣連接管另一端接在
寵物氧艙氧氣接口 (直接插入到底即可)



(完成圖)

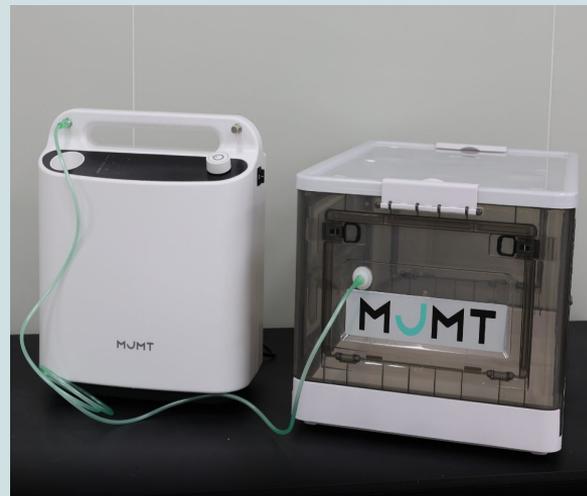

MJ-P33 寵物製氧機與霧化套組

MUMT



氧氣連接管連接之方式



①

逆時針旋開霧化口蓋



②

將氧氣連接管插到霧化口接頭



③

將氧氣連接管另一端插入霧化杯底下進氣口(凸出處), 確保兩者有接好




MJ-P33 寵物製氧機與霧化套組

MJMT

霧化水杯裝水注意事項

將寵物用的藥液倒入霧化水杯中

！ 注意勿超過最上緣的刻度 ！

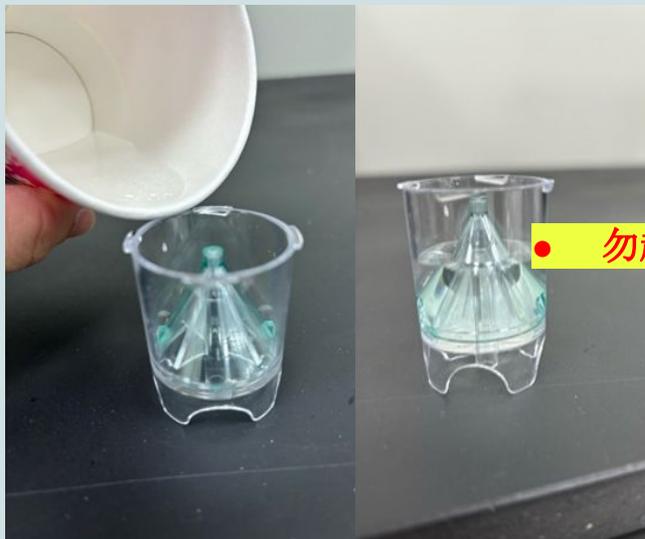

霧化噴嘴與霧化杯接法



可使用膠帶將霧化杯固定在氧艙旁

(示意圖)





MJ-P33 寵物製氧機與潮濕瓶

MUMT

氧氣連接管連接之方式

- ①將氧氣連接管一端接在寵物製氧機出氧口處
- ②另一端接在潮濕瓶上方接口處
- ③將另一條氧氣連接管接上潮濕瓶接口處
- ④另一端接在寵物氧艙氧氣接口處

(完成圖)

