



MUMT

盟 洲 醫 材

製氧機 X51

— 操作說明 —

產品基本裝箱清單

1 盟洲製氧機 X51*1台

2 潮濕瓶*1個

3 潮濕瓶連接管*1條

4 鼻氧管*1條

5 產品使用手冊*1本



X51製氧機身外觀

機身正面



機身背面



產品零部件介紹

顯示面板 流量調節閥 電源開關




霧化功能接口 氧氣輸出口



操作步驟說明

步驟1


將連接管&鼻氧管接上潮濕瓶 裝上機身

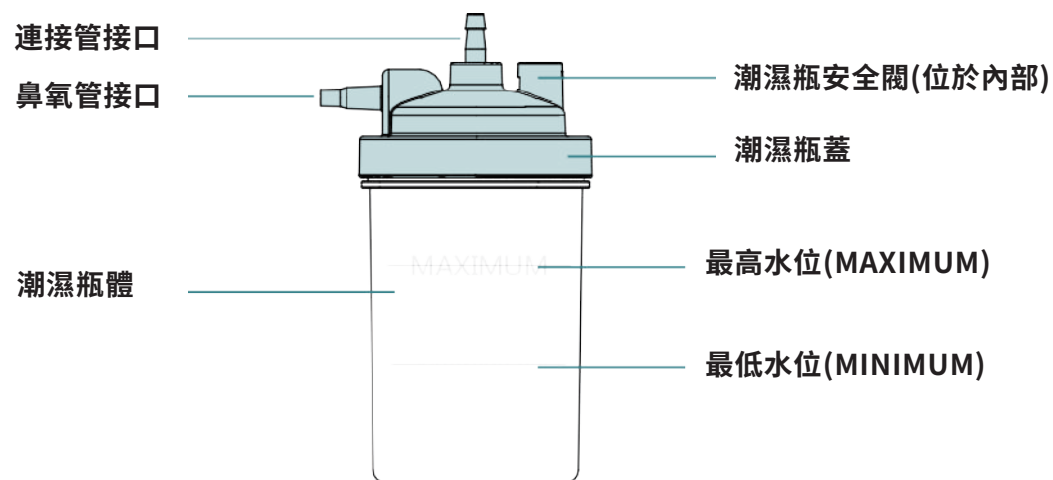

*潮濕瓶內建議使用純水、蒸餾水

*瓶內水需每日更換


*水量約瓶身1/2 (介於最低&最高水位之間)

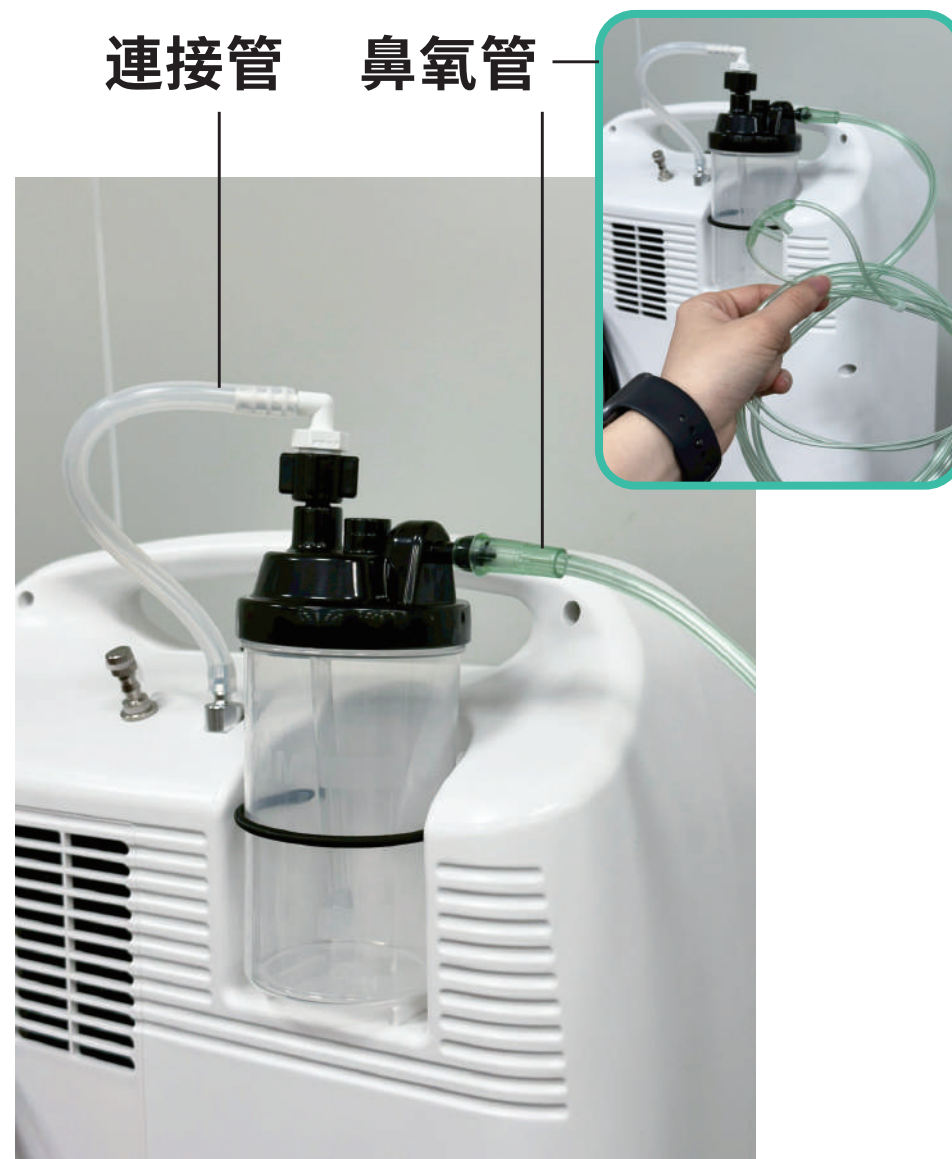

操作步驟說明

步驟2

插上電源插頭，保持室內空氣流通，機身離牆至少30cm
底部淨空，確保機器散熱正常

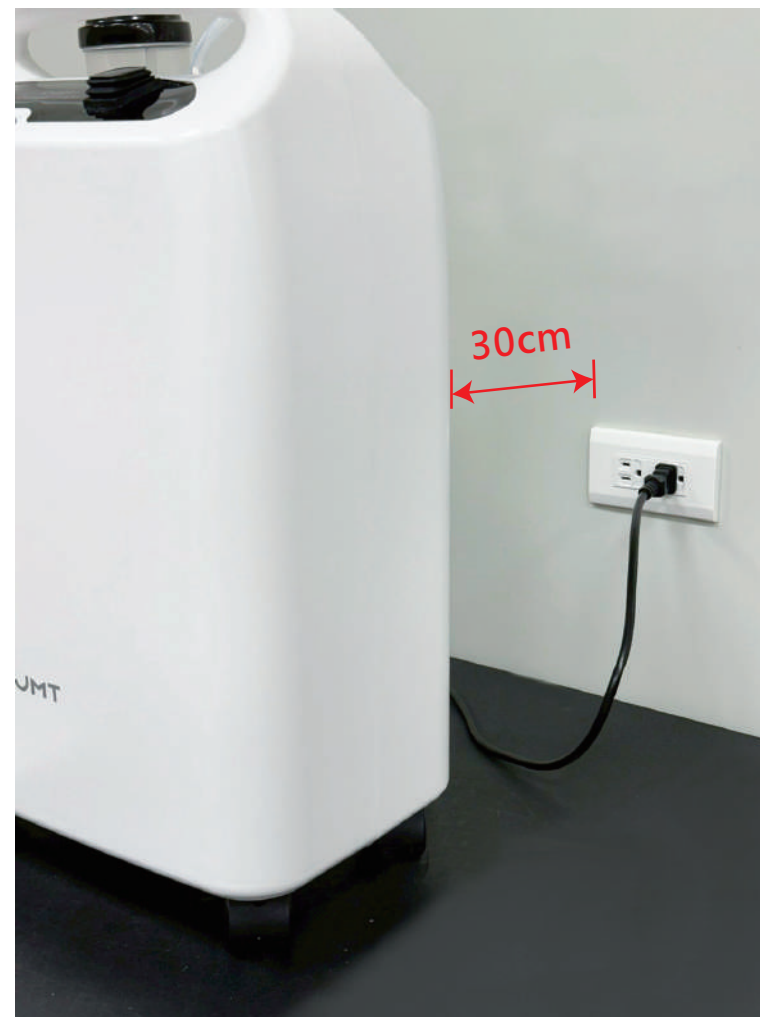

*請勿使用延長線 / 需獨立電源使用

操作步驟說明

步驟3


開啟電源 / 調整流量(依醫囑調整)



*流量浮球調整勿低於1L或高於紅線

*關機步驟:將流量計調整歸零→關閉電源→拔除插頭

顯示螢幕指示

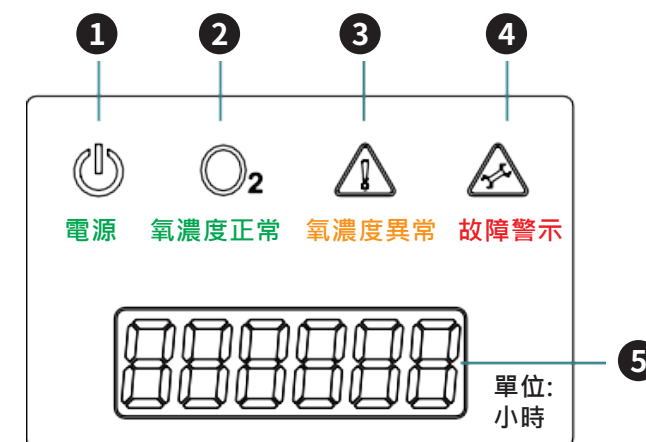

① 綠色電源指示燈-機器運轉正常

② 綠色正常指示燈-氧氣輸出正常

③ 黃色低氧指示燈-氧氣輸出濃度低

④ 紅色服務指示燈-聯繫維修服務

⑤ 機器運轉時數累計顯示

鼻氧管使用說明

步驟1

將鼻氧管前端的兩個小管確認方向（彎口朝下）
準備放入鼻孔前，先檢查管路是否扭曲

步驟2

將兩個小管輕輕放入鼻孔
管線沿著臉頰向兩側拉到耳朵上方固定

步驟3

將管線繞過耳後，在下巴下方調整滑扣，固定鬆緊度
(以不壓迫、不滑落為原則)

*小提醒

鼻氧管輕放即可，若感覺鼻腔乾燥，可搭配潮濕瓶使用。




霧化套件介紹




*霧化套件組可依需求自行額外選購

噴霧吸嘴組裝示意圖

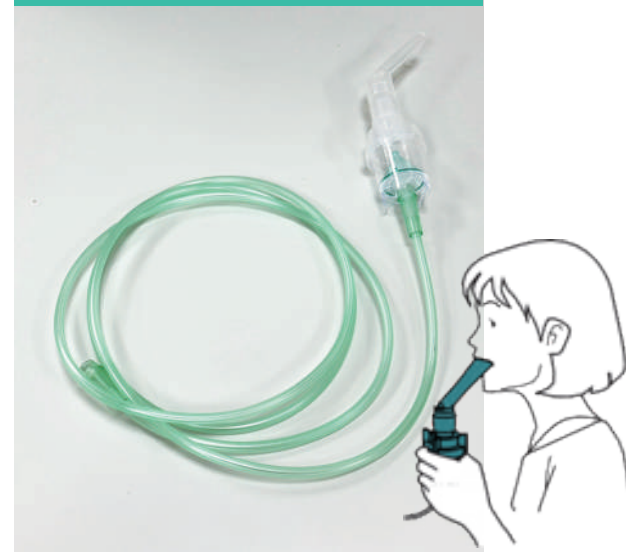

氧氣面罩組裝示意圖

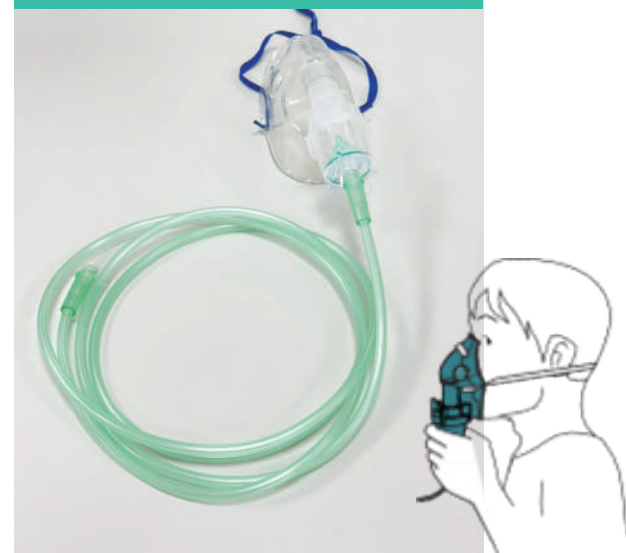

霧化套件使用說明

藥劑添入霧化杯



*勿超過最上緣刻度

蓋上霧化杯蓋



接上面罩&氧管



逆時針轉開



霧化接口開啟



接上氧管



進氣過濾棉清潔

1 過濾棉卡槽位於機身背面



2 將過濾棉卡槽拆卸



3 將過濾棉取出清潔



進氣過濾棉：建議每個月至少2次，將機殼打開取出過濾棉，用清潔劑及清水清潔後，放置空氣中自然乾燥，待乾透後，裝回繼續使用。

進氣過濾器更換

過濾器位於過濾棉卡槽後方,需先將過濾棉卡槽卸下,自行定期更換即可。



機器內部進氣過濾器**不可**用水清洗，建議約3000小時或一年可以更換新過濾器

*自行水洗將造成機器內部受潮或損壞。